

Schienen und Aufbißschienen

Ihr Zahnarzt hat Ihnen eine Schienentherapie verordnet?

*Diese Schiene wird von uns nach aktuellen funktionellen und werkstoffkundlichen Erkenntnissen hergestellt und besteht aus einem hochwertigen Zweikomponenten-Druckformmaterial, welches als **ausgezeichnet biologisch verträglich** bewertet wird.*



Wichtig ist eine sorgfältige Pflege der Schiene:

*Empfehlenswert ist die **tägliche Reinigung mit Zahnpasta, Zahnbürste und klarem Wasser / Mundwasser (ohne Alkohol).***

BITTE BEACHTEN: Die Schiene zu den Mahlzeiten nicht im Mund belassen, da die Möglichkeit der Verfärbung und Verformung des Materials besteht.

Die Schiene hat keine Kau- und Essfunktion, da Bruchgefahr besteht!

Um Veränderungen und Verfärbungen zu vermeiden, sollten Reinigungsmittel mit Farbstoffen nicht eingesetzt werden.

Ultraschallgeräte, Prothesenreiniger und Reinigungsverfahren, die über 70° C hinausgehen, sind zu vermeiden.

Individuelles Mundmilieu, mangelnde Hygiene, stark aromatische Genuss- und Lebensmittel oder Getränke (Nikotin, Kaffee, Tee, Cola), sowie Medikamenteneinnahme können zu geschmacklichen und geruchlichen Beeinträchtigungen führen.

Gleichfalls dürfen aromatische Kohlenwasserstoffe wie Benzol, aliphatische Alkohole, Toluol, Ethanol, Aceton etc. nicht zur Reinigung verwendet werden.

Einige Produkte auf pflanzlicher Basis zur Behandlung von Entzündungen der Mundschleimhaut und des Zahnfleisches (z. B. Pyralvex) können ebenfalls zu Verfärbungen und Aufquellen bzw. Zerstören des Kunststoffes führen und sind unbedingt zu vermeiden.

Verfärbungen können außerdem eintreten bei Wechselwirkungen von Zahnfüllungsmaterialien bzw. Zahnersatz (Amalgam, edelmetall-reduzierte Legierungen, Kobalt-Chrom-Molybdän).

Bei allen Veränderungen Ihrer Schiene kontaktieren Sie bitte Ihren behandelnden Zahnarzt.